


Étapes

1. Imprimer cette feuille à l'échelle 100%
2. Déterminer approximativement la longueur excédentaire à enlever
3. Aligner les côtés extérieurs
4. Tracer au crayon non permanent la forme à couper
5. Retourner la visière sur elle même pour faire de l'autre côté les étapes #3 et #4
6. Couper la visière en suivant la ligne tracée avec des ciseaux

Step

1. Print this sheet at 100% scale
2. Determinate the excedentary lenght to cut
3. Align external sides
4. Trace the shape to cut with a non-permanent pencil
5. Turn over the visor and repeat step #3 and #4
6. Cut the visor following the drawn line with cisors

Étape #3: Step #3  
Aligner ici Align here

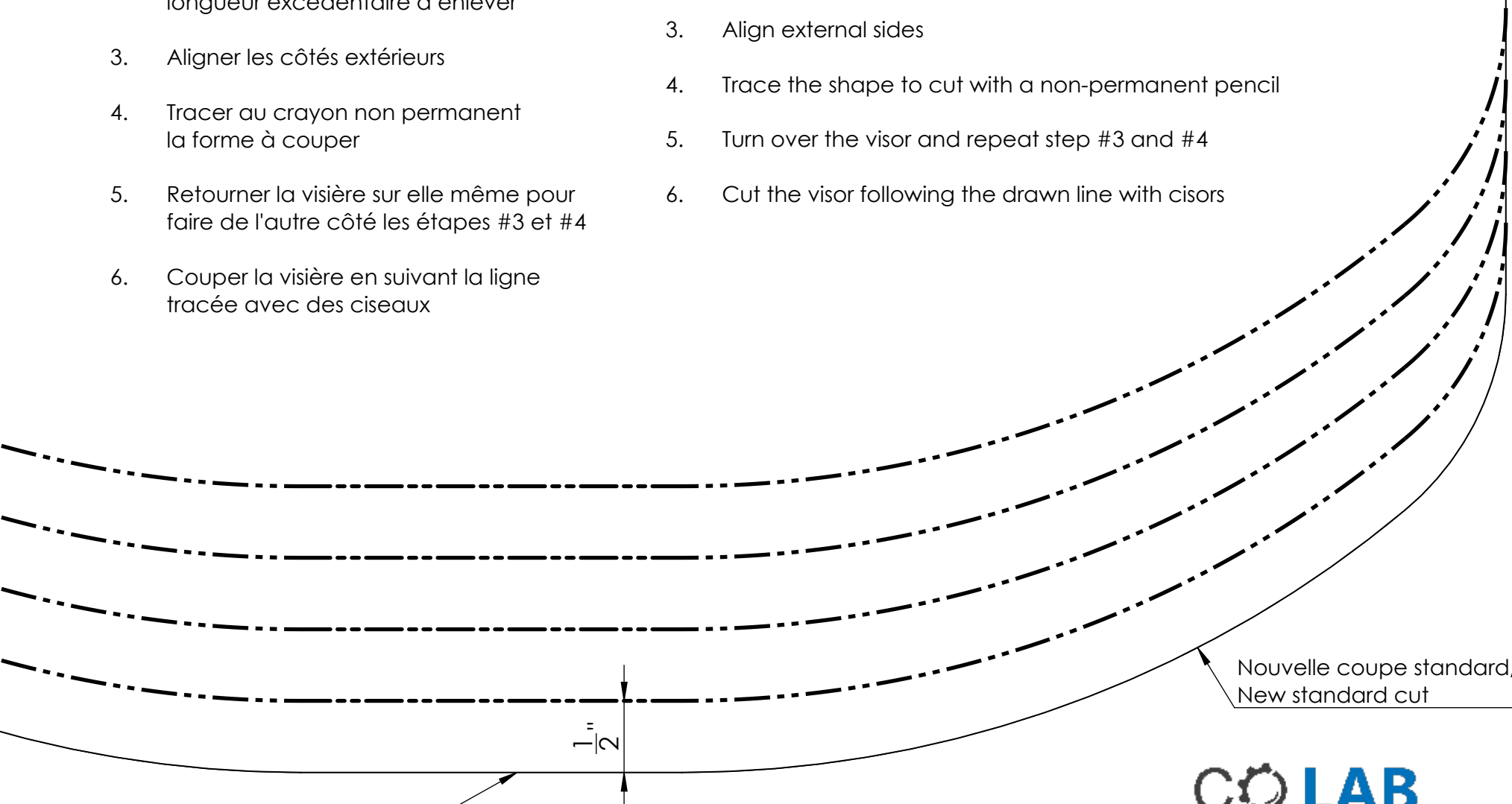

Étape #3: Step #3  
Aligner ici Align here

Nouvelle coupe standard/  
New standard cut

